



Frejkas pude er et hjælpemiddel, der bruges på børn, som har medfødt hoftedysplasi (HD). Frejkapuden bæres som en buks med bælte og seler, og det sikrer, at benene holdes i en position, hvor de er vendt udad, så lårbenshovederne presses ind i deres respektive hulrum i bækkenet. Behandlingen tager normalt tre til fire måneder, og i denne periode har nækkenet vokset så at lårbenshovederne nu ligger fast på plads i deres hulrum. Benene kan således drejes på normal vis uden at skabe problemer for barnet.

Frejkapuderne findes i disse størrelser: 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm og 24 cm

Frejkapuden er nem at bruge.

Den tages på som en buks eller shorts, og bælteerne er forsynet med Velcro, så de kan justeres individuelt. Det elastiske bæltet omkring taljen tilpasses også ved hjælp af Velcro.

Det er vigtigt, at puden sidder godt fast på barnet!

Den aktive pude er kun 10 mm tyk, og man kan således have den under det sædvanlige tøj, og Frejka puden vil være mindre synlig.



Vedligeholdelse

Ta ud puden, og det øvrige kan vaskes ved 60 °C Alle Velcro er indrettet således, at de kan "aflåses" ved vask, og således ikke klæber til andre beklædningsgenstande. Pudebetrækket er bomuld / polyester og er skånsomt mod huden. Puden bør vaskes i hånden. Den har lukkede celler som vil briste i vaskemaskinen. Puden trækker ikke vand og kan tørres / vasket med en klud eller skylles under vandhanen (ikke alkohol).

